

nosiboo^{*}eco
manual nasal aspirator

Guide de l'utilisateur

Aspirateur nasal manuel Nosiboo ECO



E-Mail: customerservice@nosiboo.com

Web: www.nosiboo.com

Tel: +36 72 551 642




Fabriqué par : ATTRACT KFT.

H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Hongrie

Made in EU



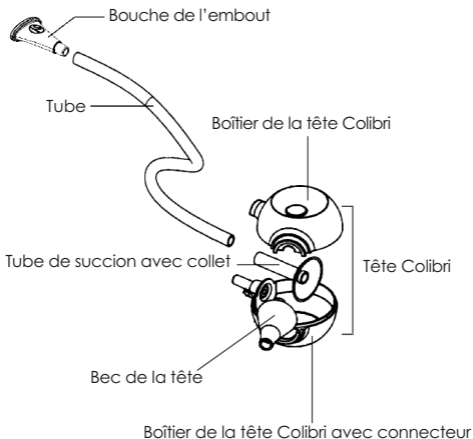

Règles de sécurité

Il faut éviter les situations dangereuses suivantes. Autrement, des blessures, ou même un accident mortel, pourraient se produire.

Mise en garde – L'appareil est conçu exclusivement pour éliminer le mucus nasal d'un enfant. Désinfectez la tête Colibri après chaque utilisation. Ne laissez pas les pièces démontées de l'aspirateur Nosiboo ECO à portée de main des enfants, car ils pourraient les avaler. Seuls des adultes doivent utiliser l'appareil. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance près d'enfants ou de personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées avant d'utiliser l'appareil.

Si, après avoir utilisé l'appareil, vous découvrez des rougeurs ou des boutons sur le nez de l'enfant, n'utilisez plus l'appareil! Consultez un médecin! N'utilisez pas l'appareil si l'enfant souffre d'hémophilie, si les vaisseaux sanguins de la muqueuse de la cloison du nez se dilatent, si vous constatez des saignements de nez fréquents, lors de la prise d'anticoagulants, en cas de malformations congénitales (p. ex., palatoschisis).

1. Utilisation prévue

Prévention des complications causées par le rhume chez l'enfant et accélération du processus de guérison par l'élimination du mucus nasal. Recommandé pour les enfants (généralement de moins de quatre ans) qui ne sont pas capables d'éliminer le mucus nasal d'eux-mêmes en se mouchant. Le vide nécessaire à l'aspiration est créé par la bouche de l'utilisateur (grâce à la conception détachée de manière indirecte).

Les bébés doivent être couchés, tandis que les jeunes enfants doivent être assis dans une position stable lors de l'aspiration de leur nez. Mettez la bouche de l'embout dans votre bouche et insérez le bec de la tête préalablement désinfecté dans la cavité nasale, en pointant légèrement vers le haut, vers le globe oculaire. Dans cette position, vous pouvez doucement déplacer le bec de la tête en effectuant une succion intermittente dans le tube à l'aide de votre bouche. Le point de connexion du tube doit être orienté vers le bas pendant l'utilisation. On peut dissoudre le mucus nasal sec ou très épais à l'aide de solutions salines. N'utilisez pas plus de 5 ml de solutions salines à la fois. Après avoir utilisé la solution, attendez quelques minutes. Ce n'est que par la suite que vous devez utiliser l'aspirateur nasal. L'Aspirateur Nosiboo ECO peut contenir jusqu'à 5 ml de liquide clair. Le liquide aspiré s'accumule sur la paroi interne de la tête et, grâce à sa conception brevetée, le liquide ne peut s'échapper de l'intérieur de la tête Colibri. On peut donc l'utiliser en toute sécurité sans filtre.

2. Introduction et utilisation de l'appareil

1. Nettoyez les pièces de la tête Colibri (voir les chapitres consacrés au nettoyage et au stockage).
2. Insérez le tube de succion avec collet dans la partie du boîtier de la tête Colibri dans laquelle se trouve la connexion.
3. Placez la partie du boîtier de la tête Colibri qui ne possède pas de connexion dans la bonne position.
4. Poussez le bec de la tête flexible sur le collet correspondant.
5. Fixez une extrémité du tube sur la connexion de la tête Colibri.
6. Fixez l'autre extrémité du tube sur la bouche de l'embout.

On peut utiliser l'appareil plusieurs fois par jour. L'objectif général consiste à apaiser la respiration de l'enfant. Utilisation suggérée : plusieurs fois par jour, au besoin, après le réveil, avant les repas et avant de dormir.

3. Nettoyage et stockage – La tête Colibri peut être démontée après que vous avez déconnecté le tube et le bec de la tête. Pour nettoyer la bouche de l'embout, retirez-la du tube. Ensuite, nettoyez les pièces à l'eau tiède, mettez-les dans une solution désinfectante et laissez-les sécher. Solution désinfectante recommandée : Chicco Désinfectant. L'appareil doit être gardé dans un endroit fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil ou des systèmes de chauffage radiant.

4. Environnement – L'aspirateur nasal manuel Nosiboo ECO ne présente aucun risque pour l'environnement. C'est pourquoi on peut le jeter avec les ordures ménagères.

5. Spécifications

Poids (avec l'emballage) : 105 g

Dimensions (avec l'emballage L x H x L) : 200 x 200 x 50 mm

Durée de vie prévue : 3 mois